

Gebrauchsanleitung  
Escape-Chair<sup>®</sup> VOLT

Inbetriebnahme		
1	Stellen Sie den Escape-Chair <sup>®</sup> VOLT vor sich auf, so dass Sie die Gleitriemen sehen können.	
2	Sorgen Sie dafür, dass die Feststellbremse aktiv ist. Diese Bedienen Sie mit Ihrem Fuß und sorgen somit dafür, dass der Escape-Chair <sup>®</sup> VOLT nicht wegrutschen kann.	
3	Öffnen Sie den Sicherheitsgurt des Escape-Chair <sup>®</sup> VOLT durch drücken des roten Knopfes.	
4	Klappen Sie den Escape-Chair <sup>®</sup> VOLT aus, indem Sie den Sitz nach vorne ziehen.	
5	Lassen Sie die zu evakuierende Person im Escape-Chair <sup>®</sup> VOLT platznehmen.	
6	Legen Sie den Sicherheitsgurt fest um die zu evakuierende Person.	
7	Klappen Sie für mehr Komfort die Armlehnen herunter.	

8	<p>Um den Griffbügel in der Höhe zu verstellen, ziehen Sie den roten Griff leicht nach oben. Der Griffbügel kann in 3 Höhen verstellt werden.</p>	
9	<p>Falls die zu evakuierende Person keine Kontrolle mehr über den Kopf hat, fixieren Sie ihn mittels des Klettbandes an der Kopfstütze.</p>	
10	<p>Klappen Sie die Fußstütze aus und lassen Sie den zu evakuierenden die Füße darauf ablegen.</p>	
11	<p>Klappen Sie die Gleitriemen aus, indem Sie die rote Scheibe rechts an der Gleitriemenkassette entriegeln. Stellen Sie sicher, dass die Gleitriemen vollständig ausgefahren sind.</p>	
12	<p>Sorgen Sie dafür, dass der an/aus Schalter des Akku's auf "an" steht.</p>	
13	<p>Drücken Sie auf den roten Knopf des Displays um die Bedienung des Gerätes zu starten.</p>	

Treppab fahren:		
14	Lösen Sie die Bremse mit dem Fuß von den Rädern und fahren Sie in Richtung der Treppe.	
15	An der Treppe angekommen, neigen Sie den Escape-Chair® VOLT nach hinten, bis der Evakuierungsstuhl auf den beiden großen Hinterrädern fährt.	
16	Fahren Sie nun soweit nach vorne, bis die Gleitriemen die erste Treppenstufe erreichen.	
17	Drücken Sie nun den silbernen Knopf auf der linken Seite des Displays und halten Sie diesen gedrückt. Hierdurch kommen die Gleitriemen in Bewegung, um die Treppe herunter zu fahren. Achtung : Es gibt 3 Geschwindigkeitsstufen. Wählen Sie Ihre bevorzugte Geschwindigkeitsstufe, indem Sie auf dem Display + und - auswählen. Wenn Sie auf der Treppe anhalten möchten, lassen Sie den silbernen Knopf los. Halten Sie jedoch zu jeder Zeit den Griffbügel fest.	
18	Drücken Sie stets den Griffbügel in Richtung Ihrer Füße und achten Sie darauf in gerader Linie nach unten zu fahren. Achtung: Führen Sie die genannten Schritte immer an der Innenseite der Treppe aus.	
19	Wieder auf der Ebene angekommen, stellen Sie den Escape-Chair® VOLT auf alle 4 Räder und fahren Sie Richtung Sammelplatz.	

Treppauf fahren:		
20	Lösen Sie mit Ihrem Fuß die Bremse und fahren Sie Richtung Treppe.	
21	Bei der Treppe angekommen, drehen Sie den Escape-Chair® VOLT rückseitig, so dass die Gleitriemen an der Treppe aufliegen.	
22	Kippen Sie den Escape-Chair® VOLT soweit nach hinten, dass die Gleitriemen auf zwei Treppenstufen aufliegen.	
23	Betätigen Sie den silbernen Knopf auf der rechten Seite des Displays und halten Sie Diesen gedrückt. Die Gleitriemen setzen sich nun in Bewegung um die Treppen nach oben zu fahren. Achtung: Auch hier gibt es 3 Schnelligkeitsstufen. Wählen Sie Ihre bevorzugte Schnelligkeitsstufe, indem Sie auf dem Display + und - anwählen. Wenn Sie auf der Treppe anhalten möchten, lassen Sie den silbernen Knopf los. Halten Sie jedoch zu jeder Zeit den Griffbügel fest.	
24	Drücken Sie stets den Griffbügel in Richtung Ihrer Füße und achten Sie darauf gerade nach oben zu fahren. Achtung: Führen Sie die genannten Schritte immer an der Innenseite der Treppe aus.	
25	Wieder auf der Ebene angekommen, stellen Sie den Escape-Chair® VOLT auf alle 4 Räder und fahren Sie Richtung Sammelplatz.	

Einklappen/Aufbewahren		
26	Am Sammelplatz angekommen, helfen Sie dem zu Evakuierenden aus dem Evakuierungsstuhl.	
27	Bringen Sie den Escape-Chair® VOLT zurück an seinen Platz und klappen Sie ihn dort ein.	
28	Klappen Sie die Armlehnen, Fußstütze sowie die Tragebügel des Escape-Chair® VOLT ein.	
29	Betätigen Sie durch drücken die rote Stange zwischen den Gleitriemen und klappen Sie so den Escape-Chair® Volt zusammen.	
30	Nutzen Sie den Sicherheitsgurt um den Escape-Chair® VOLT zu befestigen.	
31	Bewahren Sie den Escape-Chair® VOLT nun an seinem vorgesehenen Platz auf und decken Sie ihn falls gewünscht mit der dazugehörigen Abdeckhülle ab.	

Informationen bezüglich Akku:	
	Der 36V Akku kann mittels beiliegendem Kabel aufgeladen werden. Der Akku kann während des Ladevorgangs im Escape-Chair® VOLT verbleiben oder entnommen werden. Achtung: Der Akku muss "eingeschaltet" sein, sonst lädt dieser nicht auf.
	Der Akku kann aus dem Escape-Chair® VOLT mit Hilfe eines mitgelieferten Schlüssels entfernt werden. Achtung: Auf jedem Schlüssel steht ein Code, den Sie notieren sollten. Mittels des spezifischen Codes können Sie weitere Schlüssel nachbestellen.
	Die Ladezeit des Akkus beträgt 3-5 Stunden. Der Akku kann Ca. 1,5 Stunden in Dauerbetrieb sein (in Abhängigkeit von der Schnelligkeitsstufe und dem Gewicht des zu Evakuierenden).
	Die Lebensdauer des Akkus beträgt 3-5 Jahre. Wenn der Escape-Chair® VOLT längere Zeit nicht benutzt wird, empfehlen wir, den Akku alle 3 Monate aufzuladen.
	Auf dem Display befindet sich ein blauer Knopf, mit dem sich die LED-Beleuchtung einschalten lässt.
	Auf diesem Display ist ebenfalls angegeben, welche Akkuleistung noch vorganden ist.

**Achtung:** Der Escape-Chair® VOLT ist nur durch eingewiesene Personen zu bedienen. Schulungen können nur durch zertifizierte Personen der Escape Mobility Company durchgeführt werden. Der Escape-Chair® VOLT hat eine Traglast von 180KG.

Bei Personen mit einem Gewicht über 100KG, empfehlen wir die Evakuierung durch 2 Personen durchzuführen.

Der Escape-Chair® VOLT ist mit Tragegriffen an Vor- und Rückseite ausgestattet. Der Escape-Chair® VOLT kann somit auch getragen werden. An der Vorderseite sind die Griffe ausziehbar, an der Rückseite ausklappbar.

Der Escape-Chair® VOLT ist nicht für den Gebrauch auf Wendeltreppen geeignet.

Der Escape-Chair® VOLT kann möglich schwarze Streifen auf der Treppe hinterlassen.

Kontrollieren Sie nach jeder Benutzung den Escape-Chair® VOLT auf eventuelle Beschädigungen. Nehmen Sie bei Beschädigungen Kontakt mit uns auf.

Schalten Sie den Escape-Chair® VOLT nach Gebrauch aus.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung stets auf.